

auto-CREATININE liquicolor

Reacción de Jaffé

Prueba fotométrica colorimétrica para mediciones cinéticas de creatinina

Presentación del estuche

REF ⁵	10052	250ml	Estuche completo
IVD			

Método^{1,2}

La creatinina en solución alcalina forma un complejo coloreado rojo naranja con ácido pícrico. La absorbancia de este complejo es directamente proporcional a la concentración de creatinina en la muestra.

Principio

Creatinina + Acido Pítrico → Complejo Creatinina- picrato

Contenido

NaOH	2 x 100 ml Hidróxido de Sodio X _i (R36/38) (S 26-37/39-45)	160 mmol/l
PIC	1 x 50 ml Acido Pítrico	13,9 mmol/l
STD	1 x 25 ml Estándar Creatinina	2 mg/dl ó 176,8 mmol/l

Preparación del reactivo

Para los analizadores automáticos, NaOH y PIC están listos para usar.

Para preparar un reactivo de trabajo mezcle NaOH y PIC en proporción 4 + 1.

STD está listo para usar.

Estabilidad de los reactivos

Los reactivos permanecen estables hasta la fecha de vencimiento, aún después de abrir, si se almacenan de 15...25°C. Se debe evitar la contaminación.

El reactivo de trabajo, protegido de la luz, permanece estable por 4 semanas de 15...25°C.

Muestra

Suero, plasma heparinizado u orina.

Evite la hemólisis!

Estabilidad: 24 horas de 2...8°C

Diluya la orina 1 + 49 con agua destilada

Ensayo

Longitud de onda: Hg 492 nm (490 - 510 nm)

Paso óptico: 1 cm

Temperatura: 37°C

Medición: contra aire (aumento de la absorbancia)

Atempere los reactivos y las cubetas a la temperatura deseada. La temperatura debe permanecer constante (± 0,5°C) durante la prueba.

Esquema de pipeteo

Parámetros para autoanalizadores (versión "2-shot")

Proporción muestra : NaOH : PIC = 1 : 10 : 2,5. Temperatura: 37°C. Método: cinética tiempo fijo (ver método manual).

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están disponibles sobre demanda. Cada laboratorio tiene que validar la aplicación en su propia responsabilidad.

Método manual

Pipeteo en las cubetas	Semi-micro	Macro
Muestra / STD	100 µl	200 µl
Reactivo de trabajo	1000 µl	2000 µl

Mezcle e inicie el cronómetro. Después de 30 segundos lea la absorbancia A₁. Lea la absorbancia A₂ **exactamente** 2 minutos después. A₂ - A₁ = ΔA_{muestra} ó ΔA_{STD}

Cálculo

1. Suero / plasma

Por favor use solamente el estándar suministrado con el estuche.

$$C = 2,0 \times \frac{\Delta A_{\text{muestra}}}{\Delta A_{\text{STD}}} \quad [\text{mg/dl}]$$

$$C = 176,8 \times \frac{\Delta A_{\text{muestra}}}{\Delta A_{\text{STD}}} \quad [\mu\text{mol/l}]$$

2. Orina

$$C = 100 \times \frac{\Delta A_{\text{muestra}}}{\Delta A_{\text{STD}}} \quad [\text{mg/dl}]$$

Concentración de creatinina en orina de 24 horas:

$$C = \text{mg/dl} \times \text{ml orina} / 24 \text{ horas} \times 0,01 \quad [\text{mg} / 24 \text{ h}]$$

$$C = \text{mg}/24 \text{ h} \times 0,00884 \quad [\text{mmol}/24 \text{ h}]$$

$$\text{Depuración de Creatinina} = \frac{\text{mg creatinina/dl orina} \times \text{ml orina} / 24 \text{ h}}{\text{mg creatinina/dl suero} \times 1440} \quad [\text{ml/min.}]$$

Conversión de [mg/dl] a [µmol/l] y viceversa:

$$[\text{mg/dl}] \times 88,402 = [\text{mmol/l}]$$

$$[\mu\text{mol/l}] \times 0,0113 = [\text{mg/dl}]$$

Características de la ejecución

Linealidad

La prueba es lineal hasta una concentración de creatinina en suero de 15 mg/dl o 1.326 µmol/l y en orina hasta una concentración de 500 mg/dl ó 44.200 µmol/l.

Diluya las muestras con concentraciones superiores en suero, plasma ó orina diluida 1 + 5 con solución salina (0,9%) y repita la prueba. Multiplique los resultados por 6.

Los datos típicos de ejecución de la prueba pueden ser encontrados en el informe de verificación, accesible vía

www.human.de/data/gb/vr/su-acrea.pdf ó

www.human-de.com/data/gb/vr/su-acrea.pdf

Valores de referencia^{3,4}

Suero	[mg/dl]	[µmol/l]
Hombres	0,6 - 1,1	53 - 97
Mujeres	0,5 - 0,9	44 - 80
Orina	1000 - 1500 mg / 24 horas	
Depuración de creatinina:		
Hombres	98 - 156 ml/min.	
Mujeres	95 - 160 ml/min.	

Control de calidad

Se pueden utilizar todos los sueros control con valores de creatinina determinados por este método. Recomendamos el uso de nuestros controles de calidad HUMATROL de origen animal ó SERODOS de origen humano.

Notas

- La reacción es altamente sensible a la temperatura. La temperatura de la reacción debe mantenerse constante.
- PIC es nocivo en contacto con la piel, inhalado o ingerido. Si hay contacto con la piel o las membranas mucosas lave con abundante agua. Si se sienta mal, consultar a un médico.
- La prueba puede ser afectada por presencia de componentes reductores. La interferencia se puede eliminar parcialmente calentando la orina por un corto período de tiempo.
- Un pequeño precipitado en la solución de hidróxido de sodio no tiene importancia.

Literatura

- Mod. method of Bartels, H. *et al.*, Clin. Chim. Acta **32**, 81 (1971)
- Mod. method of Popper, H. *et al.*, Biochem. Zeitschr. **291**, 354 (1937)
- Schirmeister, J. *et al.*, Dtsch. med. Wschr. **89**, 1018 and 1640 (1964)
- Sarre, H., Nierenkrankheiten, Thieme-Verl. Stuttg. (1959)
- ISO 15223 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied.

SU-ACREA
INF 1005201 E
01-2004-1



Human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 - D-65205 Wiesbaden - Germany
Telefon: +49 6122 9988 0 - Telefax: +49 6122 9988 100 - eMail: human@human.de